

osom[®]

Prueba iFOB



INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES DEL PACIENTE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA

RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES DE SU PACIENTE EL PAQUETE DEBE CONTENER:

- Tubo de recogida de muestras fecales con tampón
- 1 papel de recogida
- 1 bolsa de plástico con toalla absorbente
- 1 sobre con franqueo pagado
- 1 manual de instrucciones para la recogida de la muestra

CONTENIDO DEL KIT



1

CUANDO ESTÉ PREPARADO PARA DEFECAR, ETIQUETE EL TUBO DE RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES TAL Y COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

- Utilice un bolígrafo para escribir su nombre y la fecha de la recogida de heces en la etiqueta del tubo.

osom[®]
iFOBT
Stool Collection Tube

20°C 30°C

2 mL

Name _____

ID _____

Date _____

Sekisui Diagnostics, LLC.
6659 Top Gun Street
San Diego, CA 92121 USA

Nota: El tubo de recogida de heces está en inglés únicamente.

2

CÓMO COLOCAR LA HOJA DE RECOGIDA EN LA TAZA DEL INODORO:

- Saque el papel de recogida del sobre.
- Levante el asiento del inodoro.
- Despegue la tira protectora de la cinta que se encuentra en los extremos del papel.
- Coloque la hoja de recogida transversalmente en la taza del inodoro. Deje que la hoja quede ligeramente suelta.
- Asegure primero el papel a un lado colocando las tiras adhesivas en los laterales del borde del inodoro y, a continuación, asegure el otro lado.
- Baje el asiento del inodoro.



3

HAGA SUS DEPOSICIONES EN LA HOJA DE RECOGIDA

- **NO** deje que el papel de recogida ni las heces entren en contacto con el agua del inodoro o con orina.
- La muestra no se debería procesar si está húmeda o contaminada.

PRECAUCIÓN: Si la muestra se contamina de orina o del agua del inodoro, **NO** continúe. Si esto ocurriera, es necesario que recoja una nueva muestra. Coloque un papel de recogida limpio en la taza del inodoro, a continuación, recoja una muestra de heces nueva para la prueba.

4

RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES

- Desenrosque la tapa del instrumento de muestras del tubo de recogida de muestras fecales.
- No derrame ni vierta el líquido.




Tubo de recogida de muestras fecales

Final en espiral

5

CÓMO OBTENER LA MUESTRA FECAL

- Con las deposiciones en el papel de recogida, golpee al azar el extremo en espiral del instrumento de muestras en al menos 6 lugares diferentes de la deposición. **NO RECOJA LA MUESTRA MEDIANTE ARRASTRE.**
- Vuelva a introducir el instrumento de muestras en el tubo de recogida de muestras fecales y cierre la tapa con firmeza.
- Agite bien el tubo para mezclar las deposiciones.

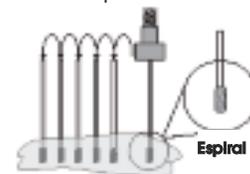

OSOM[®]

Prueba iFOB




INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES DEL PACIENTE

6

ENVÍO POR CORREO

- Coloque el tubo de recogida de muestras fecales en la bolsa de plástico y cierre el sello.
- Ponga la bolsa de plástico en el sobre de envío por correo.
- Despegue la cinta de la solapa del sobre.
- Doble la solapa por la línea y presione con firmeza.

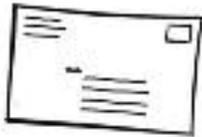

7

TIRAR DE LA CADENA

- Tire de la cadena para eliminar las muestras fecales y las hojas de recogida que queden en el inodoro.




- Si el inodoro cuenta con poca presión, tire la hoja de recogida en la papelera para evitar que se atore.

8

CÓMO DEVOLVER LA MUESTRA

- Escriba la dirección de envío, el nombre y la dirección del médico o laboratorio que le dio el paquete de recogida de muestras fecales en el espacio proporcionado en el sobre con franqueo pagado.
- Adjunte los sellos postales pertinentes y envíe el sobre a la oficina/laboratorio de su médico.

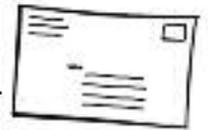

IMPORTANTE

Consulte a su médico si:

- Ve sangre en el inodoro o en sus deposiciones.
- Tiene alguna duda médica.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Sekisui Diagnostics si:

- Tiene complicaciones o no entiende cómo recoger su muestra.
- No encuentra uno de los componentes enumerados con anterioridad en las instrucciones cuando ha abierto el paquete.
- Necesita reemplazar el tubo de recogida de muestras fecales o el sobre.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SEKISUI DIAGNOSTICS

Tel.: 800-332-1042 (solo para EE. UU.)



Sekisui Diagnostics, LLC
6659 Top Gun Street
San Diego, CA 92121 USA
800-332-1042



Princeton BioMeditech Corporation
4242 US Highway 1
Monmouth Junction, NJ 08852 USA
1-732-274-1000
www.pbmc.com

El logo OSOM[®] es una marca comercial registrada en EE. UU. de Sekisui Diagnostics, LLC. © 2015 Sekisui Diagnostics, LLC. Todos los derechos reservados.